



Hillrom™



Stativo Pensile TruPort™

La modularità non è mai stata così facile

PRONTO PER OGNI IMPIEGO

STATIVO PENSILE TRUPORT™: SOLUZIONI FUNZIONALI PER UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ ED ERGONOMIA

La postazione di lavoro in ambiente clinico, per unità di terapia intensiva e in sala operatoria, è soggetta quasi ogni giorno a nuove sfide e cambiamenti. Un numero sempre maggiore di dispositivi e strumenti contribuisce a incrementare le possibilità in campo medico, ma richiede anche sistemi di alimentazione estremamente flessibili. Non si tratta soltanto di piani di appoggio regolabili o collegamenti estensibili per gas, alimentazione elettrica e dati, ma anche di migliori condizioni di sicurezza ed ergonomia. Insomma, ogni cosa deve trovarsi rapidamente al posto giusto.

Hillrom Systeme ha riunito i diversi requisiti di una postazione di lavoro ottimale in un sistema di alimentazione a soffitto particolarmente flessibile. La struttura modulare consente in qualsiasi momento di integrare nuovi componenti o riconfigurare completamente le unità di alimentazione. Le molteplici possibilità di applicazione fanno di Stativo Pensile TruPort™ una delle soluzioni per l'alimentazione più convenienti e sicure al mondo, anche per implementazioni future.



PANORAMICA DI TUTTI I VANTAGGI

SICUREZZA PER IL FUTURO

Grazie all'architettura flessibile di Stativo Pensile TruPort™, oltre a componenti e accessori innovativi, è anche possibile cambiare i moduli di alimentazione per gas medicali, alimentazione elettrica e dati attraverso semplici operazioni manuali.

ADATTABILITÀ

Le testate tecniche degli stativi Stativo Pensile TruPort™ si possono attrezzare con moduli di alimentazione, componenti e accessori diversi su tutti e quattro i lati, lungo l'intera lunghezza in modo semplice e rapido.

ERGONOMIA

Il sistema frenante a codifica cromatica, i componenti intelligenti e il dispositivo di sollevamento motorizzato opzionale creano una postazione di lavoro confortevole, dalla gestione intuitiva.

INTELLIGENZA


L'MPC Rail opzionale costituisce il punto di commutazione centrale sulla testa dello stativo e serve allo stesso tempo per il fissaggio e l'alimentazione elettrica di accessori innovativi.


RENDIMENTO

Ampio raggio d'azione, portata elevata e possibilità di configurazione quasi illimitate garantiscono un'ampia gamma di impieghi.

DESIGN

Le superfici lisce ed ermetiche, in materiali di alta qualità, facilitano la pulizia. L'eccellente qualità della lavorazione esalta il design tecnologico.

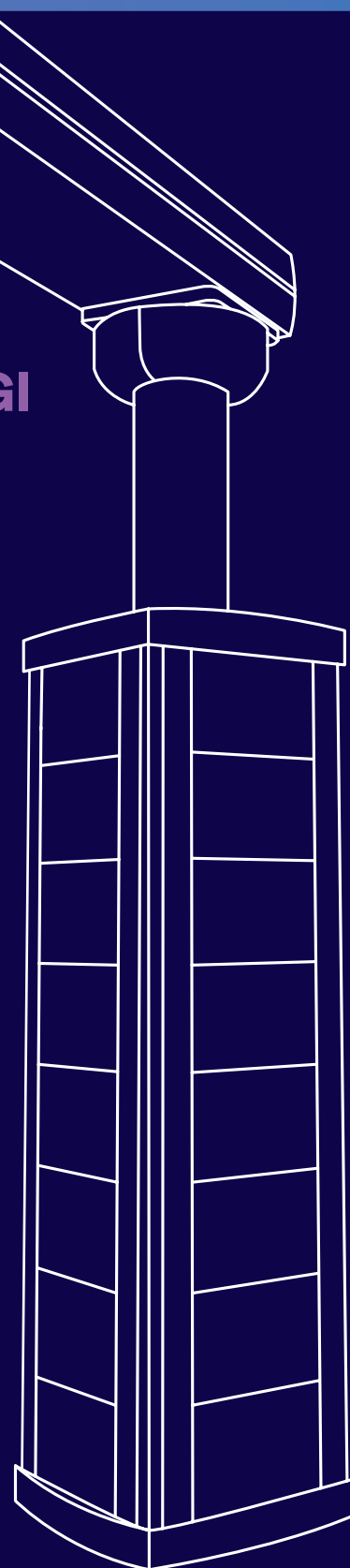

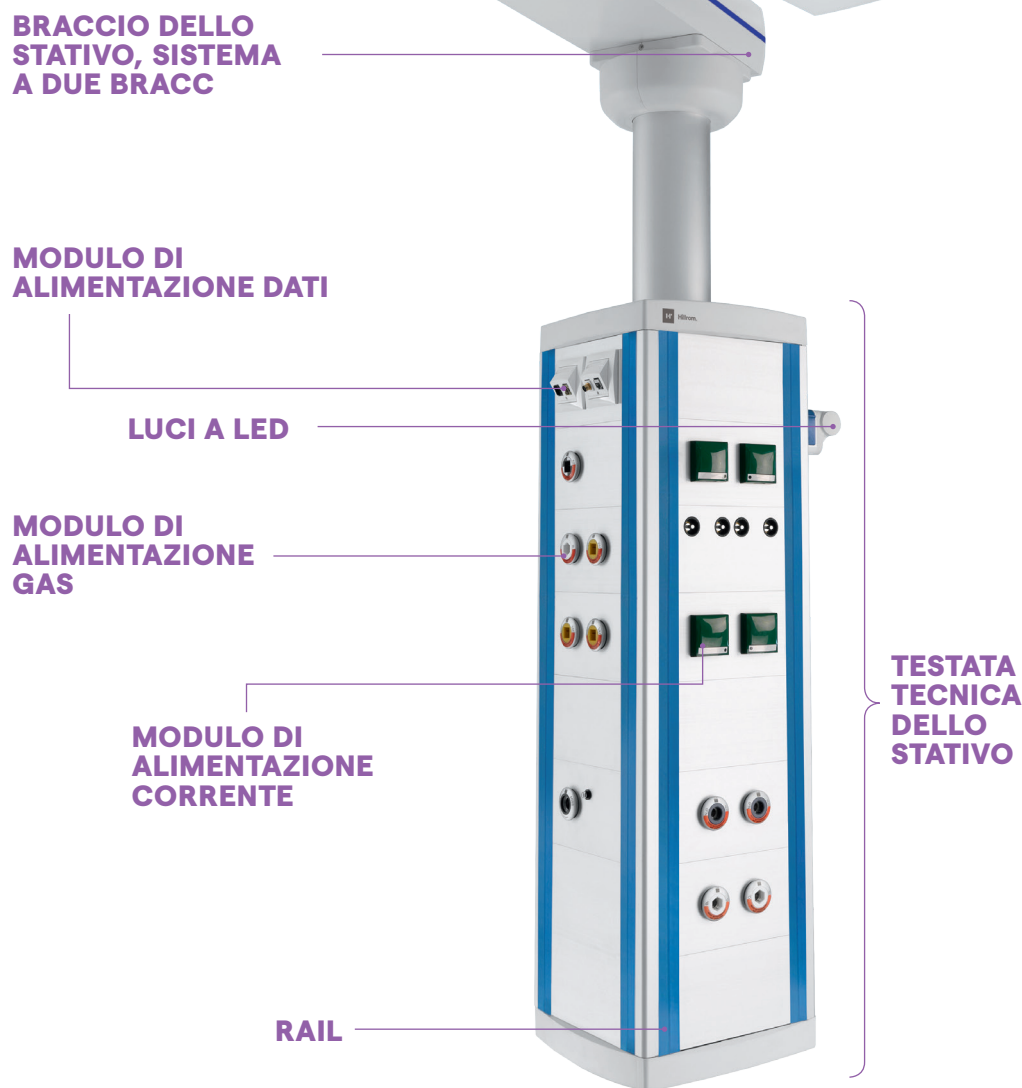

**BRACCIO DELLO
STATIVO, SISTEMA
A DUE BRACC**

**MODULO DI
ALIMENTAZIONE DATI**

LUCI A LED

**MODULO DI
ALIMENTAZIONE
GAS**

**MODULO DI
ALIMENTAZIONE
CORRENTE**

RAIL

**TESTATA
TECNICA
DELLO
STATIVO**

UN CAPOLAVORO DI MODULARITÀ

Stativo Pensile TruPort™, rivoluzionario sistema componibile modulare, soddisfa in qualsiasi momento le molteplici esigenze degli operatori – anche dopo l'installazione. Oltre ai moduli di alimentazione anche la testata tecnica dello stativo si adatta alle esigenze individuali grazie alla dotazione di piattaforme e cassette di vario tipo.


CONFIGURARE IN PIENA LIBERTÀ



Piattaforma carico medio: per max. due cassette, con funzione di comando opzionale.



Piattaforma carico pesante con cassetto porta-tastiera: facilita la documentazione sul posto ed è facile da pulire grazie al design senza maniglie.

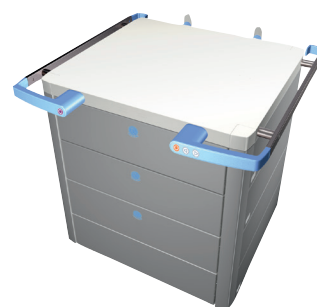

Piattaforma carico pesante: per max. quattro cassette, con funzione di comando opzionale.



Semplice fissaggio dei componenti della postazione di lavoro, su ogni lato e a qualsiasi altezza della testa dello stativo – senza utensili grazie al meccanismo a click



Rimozione del modulo di alimentazione tramite apposito strumento di estrazione Hillrom.

I GIUSTI COMPONENTI PER OGNI POSTAZIONE DI LAVORO

Il meccanismo a scatto consente di fissare diversi componenti alle guide integrate M e MPC, a tutte le altezze e su ogni lato, senza bisogno di attrezzi. È disponibile un'ampia gamma di componenti per la progettazione di singole postazioni di lavoro. Ripiani di diverse dimensioni per carichi medi e pesanti offrono spazio per ogni tipo di dispositivo medico. I diversi design dei cassette supportano i processi in corso e semplificano il lavoro.

UNA UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA CONFIGURARE IN LIBERTÀ

Le testate tecniche degli stativi TruPort™ si possono dotare di moduli di alimentazione diversi in base alle proprie esigenze: gas, alimentazione elettrica e dati. Anche dopo la prima installazione è possibile effettuare integrazioni o modifiche in modo semplice.

ESPANDIBILE PER UN MAGGIORE COMFORT

FLESSIBILE E INTELLIGENTE


Sull'MPC Rail opzionale è possibile applicare speciali componenti elettronici per la postazione di lavoro, elettrificati. I comandi di funzionamento vengono inoltrati mediante un sistema BUS. Si hanno così nuove possibilità di allestire in modo ancora più innovativo ed ergonomico la postazione di lavoro.



Un meccanismo a click, che consente di inserire le luci a LED orientabili in modo comodo e senza l'uso di utensili.



Lavoro agevolato grazie al comando remoto su MPC Rail – per il sollevamento della macchina per anestesia e il comando del freno.

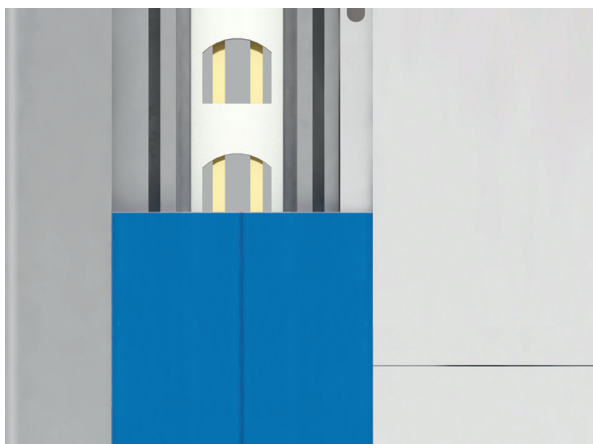

MPC Rail: intelligente con barra colletttrice 24 V e sistema BUS integrato.



Particolarmente utile nelle unità di terapia intensiva: cassetto con illuminazione AmbientLine Desk.

TruPort™ Ceiling Supply Unit

PANORAMICA SUGLI ELEMENTI DEL SISTEMA COMPONIBILE MODULARE STATIVO PENSILE TRUPORT™ CON LE RELATIVE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

	STANDARD	ULTERIORI VANTAGGI CON MPC RAIL
Sistema a bracci		
Raggio d'azione	Sistema monobraccio: fino a 1.300 mm Sistema a due bracci: fino a 3.200 mm	
Sistema frenante	Freno a frizione meccanica Freno pneumatico	Freno elettropneumatico Freno elettromagnetico ^[1]
Fissaggio a soffitto	Distanza controsoffitto fino a 2.500 mm Antisismico	
Braccio regolabile in altezza	✓	
Testa dello stativo		
Dimensioni	M (310 x 220 mm) L (310 x 310 mm)	M: - L: Integrazione di un dispositivo di sollevamento motorizzato
Lunghezza	up to 1.750 mm	
Moduli di alimentazione		
Riconfigurazione dati	✓	
Riconfigurazione gas	✓	
Riconfigurazione corrente	✓	
Componenti della postazione di lavoro		
Applicazione senza utensili grazie al meccanismo a click	✓	Componenti elettronici
Moduli AmbientLine	AmbientLine Floor, AmbientLine Ceiling	AmbientLine Desk, AmbientLine Floor, AmbientLine Ceiling
Piattaforme e cassette		
Portata	Piattaforma carico medio: 50 kg Piattaforma carico pesante: 80 kg	
Funzione di comando sulla piattaforma	Per piattaforma carico medio	Per piattaforma carico pesante
Dimensioni piattaforme (LxP)	Piattaforma carico medio: 530, 630 x 480 mm Piattaforma carico pesante: 430 ^[2] , 530, 630, 730 x 480 mm Disponibile kit di estensione (profondità) di 70 mm	Piattaforma carico medio: 530, 630 x 480 mm Piattaforma carico pesante: 430 ^[2] , 530, 630, 730 x 480 mm Disponibile kit di estensione (profondità) di 70 mm
Numero cassette per piattaforma	Piattaforma carico medio: max. 2 Piattaforma carico pesante: max. 4	

[1] Specifico per paese [2] Disponibile larghezza 430 mm anche con profondità di 260 mm
Con riserva di modifiche. Sono determinanti i dati presenti nella nostra offerta e nella conferma dell'ordine.



INFORMAZIONI SU HILLROM

Hillrom è un leader globale della tecnologia medica e i suoi 10.000 dipendenti hanno un unico scopo: migliorare i risultati per i pazienti e i loro caregiver promuovendo l'assistenza connessa. In tutto il mondo, le nostre innovazioni, che coinvolgono oltre 7 milioni di pazienti ogni giorno, contribuiscono a diagnosi e trattamenti precoci, ottimizzano l'efficienza chirurgica e accelerano il recupero del paziente semplificando la comunicazione clinica e spostando le cure più vicino a casa. Rendiamo possibili questi risultati attraverso letti smart collegati, sollevatori di pazienti, tecnologie di valutazione e monitoraggio dei pazienti, strumenti di collaborazione con il caregiver, dispositivi di assistenza respiratoria, attrezzature avanzate per sala operatoria e altro ancora, offrendo informazioni fruibili e in tempo reale presso il punto di cura. Ulteriori informazioni su hillrom.com.

**La migliore cura chirurgica inizia con
una solida base di sicurezza e supporto.**

hillrom.com

Hill-Rom Milan
Via Ambrosoli No. 6
20090 Rodano
Milano, Italy
Phone: +39 02 950541

La TruPort denominazione corrisponde ai seguenti prodotti registrati con il marchio CE (MDD): TruPort 5000; TruPort 5500; TruPort 7000; TruPort 7500

Il prodotto TruPort(TM) è destinato per essere utilizzato da medici e personale medico qualificato. Classe IIb, Organismo notificato: TÜV Rheinland LGA Products GmbH (CE0197), produttore legale TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG, Carl-Zeiss-Straße 7-9, 07318 Saalfeld, Germania). Questo dispositivo medico è un prodotto sanitario regolamentato che, ai sensi del Regolamento per l'Unione Europea, reca un marchio CE. Per un uso sicuro e corretto, Hill-Rom consiglia di leggere attentamente le istruzioni dettagliate incluse nella documentazione che accompagna i dispositivi medici. Il personale degli istituti sanitari è responsabile dell'uso e della corretta manutenzione di questi dispositivi medici. Hill-Rom si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso nel design, nelle specifiche e nei modelli. L'unica garanzia fornita da Hill-Rom è la garanzia esplicita scritta estesa ai propri prodotti in vendita o a noleggio. TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG è una controllata di Hill-Rom Holdings, Inc.